



FRIGO

VĖSINIMO DĖKLAS

wellion®
AUSTRIŠKA kokybė



FRIGO L 21 x 11 cm

FRIGO XXL 22 x 19 cm

LAIKYK INSULINĄ VĖSIAI!



ANTIBAKTERINIS

Antibakterinis vidinės kišenės impregnavimas.



VEIKIA BE MAITINIMO ŠALTINIO

Tereikia šalto vandens, veikia be elektros šaltinio.



NEREIKIA ŠALDIKLIO

Nereikia nei šaldiklio, nei šaldymo elementų.

LENGVAI IR GREITAI



FRIGO

VĖSINIMO DĖKLAS

wellion®

Wellion® FRIGO yra paprastas, greitas ir patogus būdas insulinui, insulino pompai ar kitiems vaistams atvėsinti. Tam nereikia nei elektros, nei šaldymo ar šaldytuvo. **Wellion® FRIGO** gali būti naudojamas **daug** kartų pasitelkus **vandenį**.

Kad net ir dažnai naudojant būtų užtikrinta kokybė ir higiena, vidinė kišenė yra antibakteriškai impregnuota. Tai - papildoma savybė, kuri yra labai svarbi gyvenant su insulinu ir vaistais.

Sudėtis:

Kiekvienoje pakuotėje yra:

1. **Wellion® FRIGO** išorinė kišenė;
2. **Wellion® FRIGO** vidinė kišenė, užpildyta kristalais.

Naudojimas:

1. Pakratykite **Wellion® FRIGO** vidinę kišenę, kad kristalai pasiskirstytų tolygiai.
2. Pamerkite visą **Wellion® FRIGO** vidinę kišenę į vandenį (**Wellion® FRIGO** L 10 minučių, **Wellion® FRIGO** XXL 12 minučių).
3. Kristalai šaldymo skyreliuose išbrinks, vidinė kišenė išsipūs.
4. Nušluostykite nuo vidinės kišenės vandens perteklių.
5. Atvėsintą insuliną įdėkite **Wellion® FRIGO** vidinę kišenę, o vidinę kišenę – į išorinę **Wellion® FRIGO** kišenę.

Nuolatinis naudojimas ir saugojimas:

Tik tuomet, kai kristalai vėl suketės, pamerkite **Wellion® FRIGO** vidinę kišenę į vandenį. Nuolatos naudojant, panaardinimo laikas sutrumpėja.

Nelaikykite naudojamo **Wellion® FRIGO** sandariai supakavę (kuprinėje, krepšyje, lagamine) ilgiau nei 24 valandas. Kišenei reikia oro cirkuliacijos, kad ji galėtų garinti vandenį.

Kai **Wellion® FRIGO** nenaudojate, ištraukite vidinę kišenę iš išorinės, kad išdžiūtų. Jei džiūstant, rektarčiais pakratykite, kad kristalai nesuliptų.



UAB „Monameda“

Ukmergės 369A • LT12142 Vilnius

+37068244078

info@monameda.lt

www.wellion.at/en



THE MEDICAL SERVICES COMPANY