



MOKYMO VADOVAS

i-Port Advance™

Įvedimas

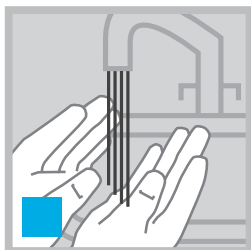


Nusiplaukite rankas su vandeniu ir muilu.

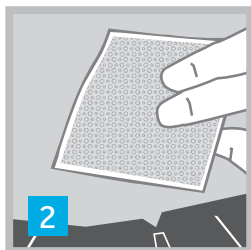


Nuvalykite odą su alkoholiu arba panašiu dezinfektoriumi. (Leiskite odos paviršiui nudžiūti prieš įvedimą).



Patraukite raudoną skirtuką ir nuimkite tarpikį.

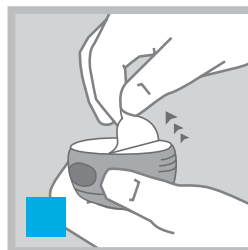

Nuimkite sterilų popierių.

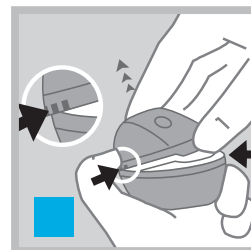


Tvirtai laikykite išoviklį ir nuimkite plastikinį dangtį.




Nuimkite pleistro apsaugą nuo pleistro paviršiaus.




Pasukite ir nuimkite adatos apsaugą nuo įvedimo adatos.

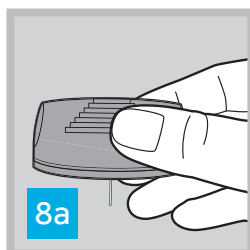


Įvedimo adata turi būti nukreipta žemyn.

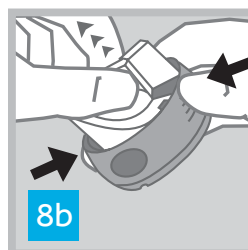

Padėkite pirštus ant pažymėtų briaunų, tuomet patraukite šoviklio centrą, kol užsifiksuos.

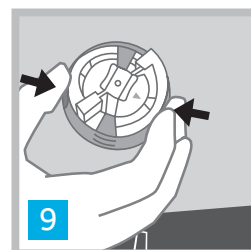


Uždėkite šoviklį ant paruoštos vietos ir laikykite už apvalių įdubimų. Suspauskite apvalius įdubimus vienu metu, kad įvestumėte i-port.

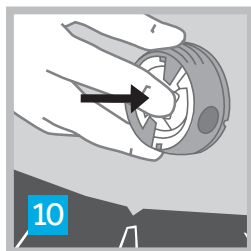

Paspauskite i-porto centrą, kad pritvirtintumėte i-port prie odos.



Suimkite už centro ir lentai nuimkite įvedimo adatą bei šoviklį.

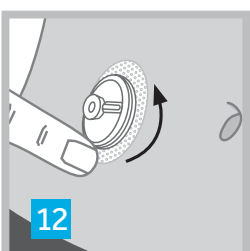

Užfiksuo­kite pleistrą.



Uždėkite dangtį atgal ant i-port sistemos ir išmeskite pagal vietinius reikalavimus.

NAUDINGI PATARIMAI


- Prieš įvesdami i-Port Advance™, atpažinkite skirtumą tarp šoviklyje esančių apvalių įdubimų ir pažymėtų briaunų.
- Traukite tik iš centro, norėdami nuimti įvedimo adatą.

Medtronic
Further Together


MOKYMO VADOVAS

i-Port Advance™


NAUDOJIMAS

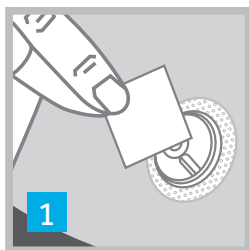


Nuvalykite pertvarą su vandeniu prieš kiekvieną naudojimą

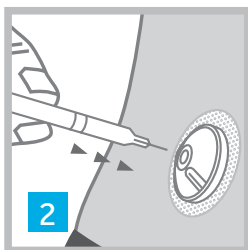


Pradurkite pertvarą naudodamiesi leidimo adata.

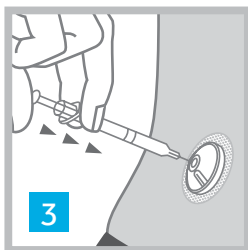

Lėtai suleiskite vaistus.

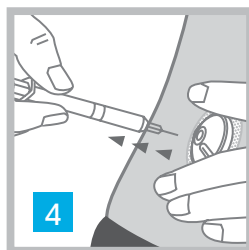


Ištraukite leidimo adatą.

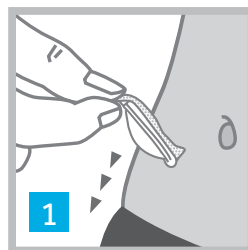


Suimkite už pleistro kraštų ir nuplėškite nuo odos.

IŠĖMIMAS

i-Port Advance dalys

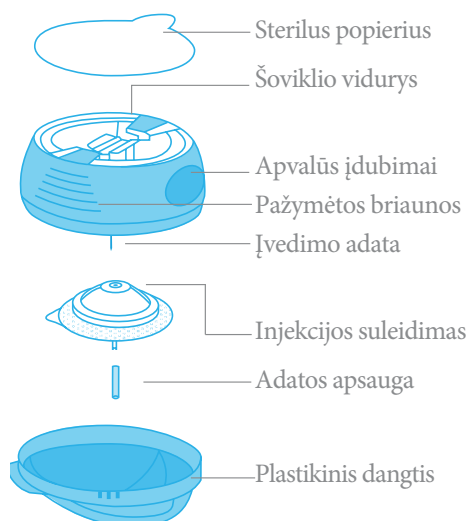

Kur įvesti?

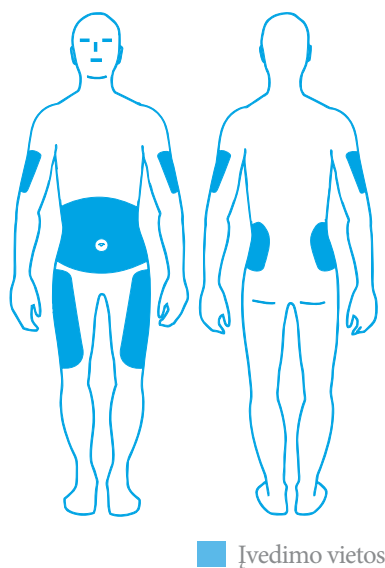

Tai papildoma informacija prie vartotojo vadovo. Dėl išsamios informacijos, skaitykite pilną vartotojo vadovą.

NAUDINGI PATARIMAI

- Naudokite i-Port Advance™ su penais ir švirkštais su adatos ilgiu 5-8mm ir didesniu nei 28G. Pastaba: kuo didesnis G skaičius, tuo adata plonesnė.
- Gali būti naudojamas įšvirkšti greito ir ilgo veikimo insuliną. Svarbu palaukite 60 minučių tarp įšvirkštimų ir visada pirmiau suleiskite greito veikimo insuliną.
- Keiskite i-Port Advance™ po 72 nešiojimo valandų arba 75 įšvirkštimų, kas bus pirmiau ir keiskite įvedimo vietas.

Dėl indikacijų, kontraindikacijų, atsargumo priemonių, įspėjimų ir nepageidaujamų reiškinių sąrašo, skaitykite pilną vartotojo vadovą.

Medtronic

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

www.medtronic.eu

Manufactured by Unomedical