



# NUKROVIMO VADOVAS

Nauja Carelink™ Personal programa lengva naudotis, lengva dalintis. Pritaikytos vaizdinės išvalgos.

## KAD PASISEKTŲ, PASIRUOŠKITE VISAS DALIS

Sujunkite USB arba matuoklį su kompiuteriu.

- Padėkite pompą kuo arčiau CareLink™ USB arba matuokliu, kuris yra įjungtas į kompiuterį
- Matuoklis turi būti sujungtas su pompa




Įsitikinkite, kad pompa yra  
pasiruošusi nukrovimui  
Įsitikinkite, kad pompoje nėra  
įjungtos šios būsenos




- ☐ Nėra aktyvios laikinosios bazės
- ☐ Nėra aktyvių pranešimų
- ☐ Nėra aktyvaus boluso
- ☐ Baterija pilna

Medtronic


# Matuoklio ar pompos nukrovimas

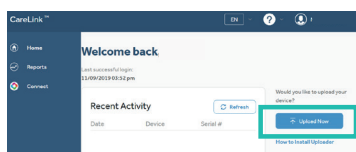


- 1 Paspauskite "Upload now" ir laukite, kol atsiras nukrovimo langas

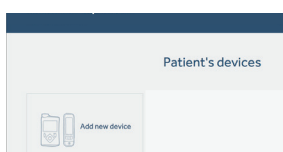


- 2 Paspauskite "Add new device" jeigu tai yra pirmas kartas, kai nukraunate pompą

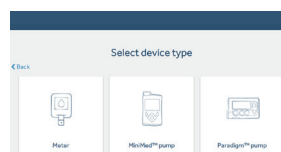


- 3 Pasirinkite įrenginio tipą, jeigu tai yra pirmas kartas, kai nukraunate pompą

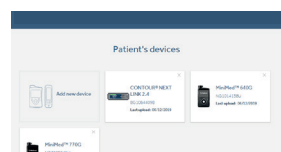


- 3a Jeigu tai nėra pirmas kartas, kai nukraunate pompą, tuomet pasirinkite prietaisą iš įrenginių ekrano.

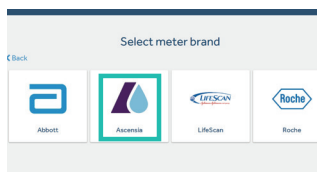


Pasirinkite matuoklio gamintoją, jeigu norite nukrauti tik matuoklį

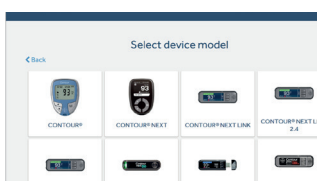


Pasirinkite matuoklio modelį

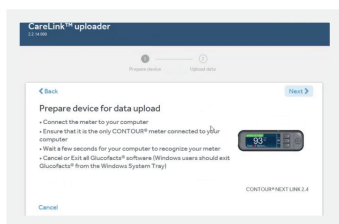


Paspauskite 'Next' kad paruoštumėte prietaisą nukrovimui

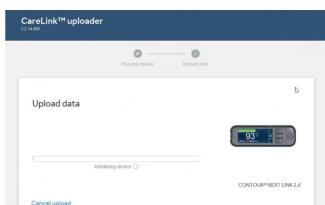


Palaukite, kol nukrovimas pasibaigs

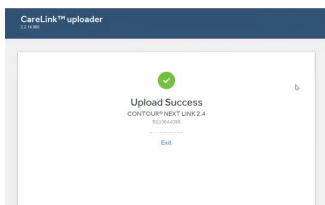


Nukrovimas sėkmingas

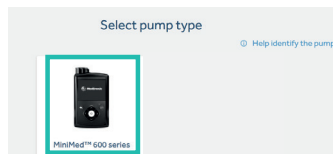


Pasirinkite pompos tipą

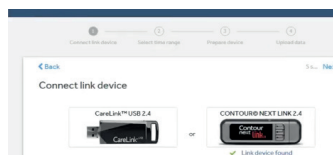


Prijunkite nukrovimo įrenginį

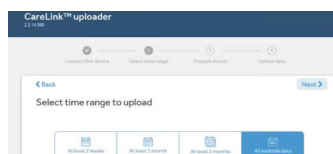


Pasirinkite laikotarpį, kurį nori nukrauti

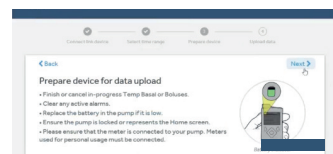


Stebėkite instrukcijas ekrane, kad paruoštumėte prietaisą informacijos nukrovimui

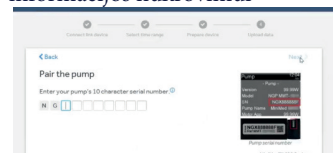

Įveskite pompos serijos numerį (tik per pirmo karto nukrovimą).

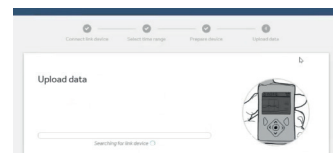

Palaukite, kol nukrovimas pasibaigs

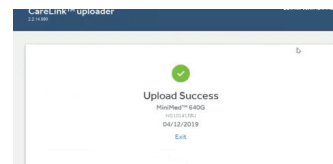

Nukrovimas sėkmingas

**MONA**meda

Medtronic distributorius Lietuvoje UAB  
"Monameda"  
Ukmergės g. 369A, LT- 12142, Vilnius  
Informacijos telefonas +370 620 44443  
Mūsų el. paštas info@monameda.lt  
www.monameda.lt

© 2019 Medtronic. Visos teisės rezervuotos. Medtronic, Medtronic logo ir Further, Together yra Medtronic prekės ženklai. Kiti ženklai yra Medtronic kompanijos prekės ženklai.  
UC202009027 EE

Saugumo informacija  
**CareLink™** programa

CareLink programa yra skirta kaip pagalbinis įrankis diabeto priežiūroje ir nėra skirtas remtis tik šiuo įrankiu diabeto priežiūroje. Dėl išsamesnių naudojimo instrukcijų, indikacijų, kontraindikacijų, įspėjimų, atsargumo priemonių ir potencialių neigiamų įvykių, skaitykite prietaiso vadovą.